

Community Mask M-DOX-A1

Masque répondant aux recommandations du document technique NBN
(NBN/DTD S 65-001:2020, version 28 Avril 2020)

• Instructions pour le port du masque

illustrations indicatives et non contractuelles



Étape 1 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant minimum 30 secondes avant de toucher le masque

Étape 2 : Vérifiez le masque pour vous assurer qu'il n'y ait ni trou ni déchirure

Étape 3 : Tenez le masque avec la ligne nasale vers le haut et dans le sens d'application sur le visage.

Étape 4 : Maintenez les deux boucles auriculaires, étirez-les doucement et accrochez-les derrière les oreilles afin que le masque couvre le nez, la bouche et le menton

Étape 5 : Ajustez la ligne nasale du masque pour l'adapter à la forme de votre nez

• Instructions pour le retrait du masque

illustrations indicatives et non contractuelles



Étape 1 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant minimum 30 secondes avant de toucher le masque

Étape 2 : Ne touchez pas l'avant du masque car il peut être contaminé. Ne touchez que les boucles auriculaires / bandes

Étape 3 : Maintenez les deux boucles auriculaires, desserrez-les et soulevez-les doucement afin de retirer le masque

Étape 4 : Déposez le masque dans un panier à linge fermé

Étape 5 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant minimum 30 secondes avant de toucher à autre chose

• Indications et données du fabricant :

- Article Ref. : Community Mask M-DOX-A1

- Contenu de l'emballage : 5 pièces de couleur blanche

- Taille : **M** (Medium)

- La fabrication est certifiée OEKO-TEX

- Composition : 3 couches de fibres superposées dont deux composées de 65% polyester et 35% coton et une 100% polyester.

- Le masque a une capacité de filtration de minimum 70 % pour les particules solides ou pour les particules liquides d'une taille de 3 µm.



- Cycle de Lavage : à la main, température: 30° degrés celsius maximum

- Séchage sur fil, à l'air libre pour respecter les fibres

- Pas de lavage en machine, pas de nettoyage à sec et pas de repassage

- Le masque peut subir 30 cycles de lavage, après quoi, son efficacité n'est plus garantie.

- **Avertissements :** Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la notice
 - Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
 - Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2)
 - Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées. Le port d'un masque peut engendrer un inconfort (sensation d'avoir moins d'air) lié à sa fonction de filtration de l'air.
 - La durée maximale d'utilisation est de 4 heures
 - Le masque ne permet pas un effort intense, comme la pratique du sport
 - Ce produit ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 3 ans en raison du risque de suffocation.
 - Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils portent ce produit
 - Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux



Afin de retrouver cette notice en néerlandais et en allemand, veuillez scanner le QR code ou rendez-vous directement sur le site :

www.info-coronavirus.be



Fabricant : Det Kim Dong Xuan One Member Company Ltd (Đông Xuân)

Adresse : 524 Minh Khai Street , Hai Ba Trung District , Ha Noi, VietNam

Service Client : doximex@doximex.vn

Site web : www.doximex.vn/en

Importateur : AVROX S.A.

Adresse : 12 rue de Bastogne L1217

Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg

Contact : contact@avrox.lu

